


## PASOS PARA LA DESINFECCIÓN DE LA INHALOCAMARA (USO HOSPITALARIO)

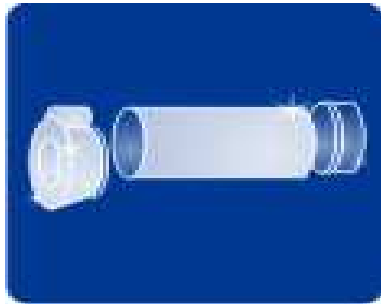

La auxiliar de enfermería desarma totalmente la inhalocámara.  
(El dispositivo debe de estar rotulado con nombre, documento y número de cama)

Se sumerge las piezas de la inhalocamara en endozime por 15 minutos se saca y se lava con abundante agua.



Confirma que todas las piezas estén completamente secas para volver a utilizar la inhalocámara:

Se guarda en un lugar seco y seguro.(bolsa plástica sellada y rotulada con nombre, documento del paciente)

**NOTA:** EL DISPOSITIVO SE DESINFECTA EN LA MAÑANA, REPITIENDO ESTE PROCEDIMIENTO DURANTE LOS DIAS DE HOSPITALIZACIÓN, CUANDO EL PACIENTE SE LE DA DE ALTA LA INHALOHALOCAMARA SE DESECHA.